


樹脂製鍼用器具

スポーツセルフケアをもっとスマートに



# RAKU RUN

## SPORTS

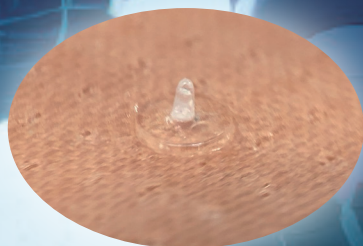- ✓ 皮膚にささない**接触タイプ**の鍼
- ✓ 金属不使用！接触部が**樹脂**
- ✓ こだわり抜いた独自の**鍼形状**
- ✓ 肌に優しい**医療用テープ**を採用



### ご注文書

商品名		商品コード	サイズ 幅 (W)× 奥行 (D)× 高さ (H)		重量	JAN コード	希望小売価格	ご注文数
ラクラン 24 鍼		9942	単品	95mm×19.5mm×125mm	29g	 4 976558 008071	1,800 円	

貴店判

貴社に出入りされている代理店様にご注文ください

年 月 日

類別：器 8 0 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 一般名称：非侵襲式家庭向け鍼用器具（JMDNコード：34675001）

## 樹脂製鍼用器具

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

- (1) 次の患者には使用しないこと。  
アレルギー体質（金属アレルギーの方を除く）
- (2) 使用方法について  
1 回限りの使用とし、再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、はりを布ばんテープ（絆創膏）に取り付けたものである。

#### 1. 形状

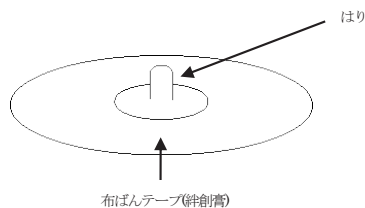

#### 2. 原材料

- ・はり：ポリスチレン樹脂
- ・布ばんテープ（絆創膏）：伸縮布
- ・離型紙：クレイコート紙・ポリスチレン押出発泡シート
- ・針床：ポリスチレン樹脂

### 【使用目的又は効果】

家庭ではり治療に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具をいう。

### 【使用方法等】

- (1) 内袋を破ってシートを取り出し、表面の白い紙の片方を、ゆっくり 1 ますごとに切り離します。
- (2) 切れ目にそって引き上げながら本品を取り出して使用して下さい。
- (3) コリや痛みのある部分を指等で押し、よく感じる箇所に貼って下さい。

### 【使用上の注意】

- (1) 本品は「使い捨て」です。1 回限りの使用とし、再使用しないで下さい。

- (2) 台紙が引き上げにくいときは、直接テープを取ってご使用下さい。
- (3) テープを貼る部位は固定しやすく、身体の活動の妨げにならない部位を選んで下さい。
- (4) テープを貼る部位を定めてからその皮膚面に密着させて貼って下さい。このときテープの粘着部分に手指が触れると粘着力が低下しますので、ご注意ください。
- (5) 傷や皮膚病のあるところ、皮下層の薄いところ、陰部位、目、鼻、口、耳の周辺及び毛髪内、毛髪に接するところ、手のひら、足の裏等には使用しないで下さい。
- (6) 貼付部をかいたりこすったりしないで下さい。
- (7) 皮膚の状態や個人差によりテープが剥がれて脱落することがありますので、ご注意ください。脱落を防ぐために早めの交換をお勧めします。
- (8) 入浴時、入浴後には貼付部が剥がれていないか確認し、タオル等で強くこすらないで下さい。
- (9) テープの取り外しは注意して行って下さい。
- (10) 使用後ははりがむき出しにならないようにして、破棄して下さい。
- (11) 使用中に異常を感じたときは使用を中止し、医師又は専門医に相談して下さい。
- (12) ご使用后、皮膚に貼り付け跡が残ることがありますが、通常は数日で消えます。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管方法>

- (1) 開封後、未使用のものはケースの中に入れて保管して下さい。また、最後の使用が終わるまでケースを捨てないで下さい。
- (2) 開封後はできるだけお早めにご使用下さい。
- (3) 乳幼児の手の届くところには保管しないで下さい。
- (4) 湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。

#### <有効期間>

- ・使用期限は外箱に記載【自己認証（弊社データ）による】

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町 180

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819



平和メディック株式会社  
HEIWA MEDIC CO., LTD.

本 社 〒506-0041 岐阜県高山市下切町180

TEL 0577-33-0511(代) FAX 0577-33-0819

東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-11 石川COビル202号

TEL 03-3258-0966

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目7番4号 新大阪生原ビル201号

TEL 06-6307-1666

当社ホームページ

